

# LE FLOSALDROM

UNE SENSATION D'APESANTEUR,  
LIBÈRE DES CONTRAINTES DU TEMPS ET DE L'ESPACE



# LE FLOSALDROM

## LE DROM

Le séjour dans un Flosaldrom constitue un événement unique en son genre. Le vaste floatarium procure à l'intérieur une sensation d'apesanteur, libère des contraintes du temps et de l'espace. Le chercheur américain bien connu sur le cerveau, le Professeur John C. Lilly, avait déjà étudié dans les années cinquante l'état de l'homme flottant en gravitation compensée (flotter = floating). La NASA a utilisé ces connaissances pour procurer aux astronautes la sensation d'apesanteur ressentie dans l'espace.

Le bassin circulaire Fosal est rempli d'une solution saline agréable pour la peau dans laquelle le corps humain flotte. La température est de 35 à 36 °C.

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La méthode scientifique REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) produit la sensation d'un bain, c'est-à-dire qu'elle procure une détente très profonde par isolement des contraintes provenant de l'environnement. La suppression de ces contraintes extérieures stimule le système nerveux et l'utilisateur du Flosaldrom est placé dans un état de détente que l'on ne pourrait atteindre qu'avec beaucoup de temps et d'effort sans floating.





Apaisement des douleurs

Bien-être mère/enfant

Maîtrise des problèmes de poids

## AVANTAGES POUR LA SANTÉ

Une littérature scientifique étendue montre les avantages pour la santé résultant d'une détente profonde.

### **Maîtrise du stress / Résistance améliorée au stress**

Le séjour dans un floatarium est un excellent moyen pour obtenir une réduction du stress.

### **Régulation de la tension artérielle**

Selon différentes études, la tension artérielle est régularisée dans le Flosaldrom, indépendamment du fait que celle-ci soit trop élevée ou trop faible.

### **Réduction des douleurs**

Les douleurs telles que celles provenant de rhumatismes se trouvent réduites par le floating. Celui-ci réduit les maux de l'appareil locomoteur en soulageant la colonne vertébrale, la musculature et les articulations.

### **Revitalisation corporelle et spirituelle**

L'isolement par rapport aux sensations extérieures renforce les forces de défense inconscientes. Les processus naturels de guérison sont accélérés. Le système circulatoire du cœur est également déchargé. L'utilisateur flotte dans une solution marine primitive qui correspond à son corps physique. Par un repos absolu, il peut se régénérer complètement, particulièrement après avoir fourni des performances sportives élevées (élimination de lactate/d'acide lactique).

### **Génération de sentiments de bonheur**

Le floating stimule la production des hormones du bonheur dénommées encore endorphines. Ceci renforce la sensation de bien-être, c'est-à-dire qu'il apparaît des effets positifs dans les cas de dépressions, de nervosité et de troubles du sommeil.

### **Meilleures possibilités d'apprentissage**

Le floating et la profonde détente associée augmentent et accélèrent la capacité d'apprendre et élèvent la créativité (meilleur accès à l'hémisphère droit du cerveau).

### **Réduction de troubles du comportement**

Les forces servant à la domination des émotions sont augmentées par le floating. Les émotions négatives et les habitudes invétérées telles que l'addiction à la nicotine et à l'alcool peuvent se surmonter plus facilement et plus efficacement. Cesser ou réduire de fumer par exemple montre un taux de succès de 81 %, alors que pour la diminution de la consommation d'alcool ce taux est de 61 %.

En état de détente profonde (état thêta), l'utilisateur acquiert la maîtrise de son propre esprit.

### **Pas d'effets secondaires négatifs sur la santé**

Le floating dans un Flosaldrom est la manière la plus rapide, la plus simple et la plus sûre d'obtenir une énorme amélioration de la qualité de la vie de tous les jours. Aucun effet secondaire négatif n'est connu. Il existe cependant certaines maladies pour lesquelles le floating est déconseillé.

## SPÉCIFICATION D'UN FLOSDROM

Le Flosaldrom présente les qualités suivantes permettant un effet de floating optimal:



➤ **Bassin circulaire de 3 m:** durant le floating, l'utilisateur ne devrait pas entrer en contact avec le bord du bassin afin d'atteindre l'effet de détente optimal. Grâce à un léger mouvement circulaire de la solution saline pendant le floating, l'utilisateur est maintenu au milieu du bassin. En cas de besoin, il y a aussi de la place pour 2 personnes, une mère et son enfant par exemple, accompagnement de débutants émotifs, etc.

➤ **Volume global:** le Drom a un bassin circulaire de 3 m et une hauteur de 2,4 m, c'est-à-dire qu'il offre beaucoup d'espace vis-à-vis d'une claustrophobie éventuelle des utilisateurs.

➤ **Hygiène:** il y a un apport de solution saline fraîche avant chaque floating. Pendant le floating, cette solution saline est nettoyée grâce à trois étages de filtres (tamis 3 mm sur l'évacuation du bassin, sac-filtre 20 µm, charbon actif avec couches de gravier). A cela s'ajoute une stérilisation par de l'ozone. Les tuyaux et les canalisations sont désinfectées à l'aide de chlore. Les valeurs du pH sont régulées. L'installation satisfait aux exigences de Medical I.

➤ **Inspiration visuelle:** au sommet du Flosaldrom de 2,4 m de haut, on peut faire apparaître à partir du PC FLOSAL des séquences d'images apaisantes. Pour des sportifs et des dirigeants, ce moyen convient très bien pour les préparer, au moyen de séquences créées pour chaque individu, à leurs hautes performances et les imprégner ainsi des séquences désirées. La grandeur de l'image est d'env. 1 m<sup>2</sup>.

➤ **Eclairage couleur:** une thérapie à l'aide d'un spectre de 256 couleurs permet de réaliser un événement couleur pour chaque individu dans le Flosaldrom.

➤ **Acoustique:** afin de renforcer l'effet de détente profonde, le Flosaldrom sert de corps résonnant. La solution saline transmet une résonance sélectionnée à l'utilisateur, ce qui permet de rendre son bien-être encore plus intense. Le son professionnel FLOSAL dispose d'un amplificateur à 6 canaux et d'une sortie 60 W.

➤ **Structure modulaire autoportante:** quatre colonnes en acrylate supportent les portes du Drom. Deux portes en acrylate de maniement facile et présentant une surface satinée ferment le Drom.

➤ **Télésurveillance:** une télésurveillance par le FLOSAL est possible à l'aide d'un modem incorporé.

➤ **Ecran tactile:** pour assurer une commande conviviale des séquences, on dispose d'un écran tactile 15".

➤ **Interface:** pour raccorder un PC externe, un CD-ROM, un DVD ou un enregistreur vidéo, le PC FLOSAL dispose d'une interface ETHERNET-BUS.

➤ **Colonnes d'entrée:** une lumière tamisée réglable grâce à un régulateur brille dans les colonnes du Drom. L'utilisateur peut ainsi mieux s'habituer à l'obscurité.

Toutes les informations sont sans engagement et sans garantie.  
Sans responsabilité les informations peuvent changer en tout temps.